


ULTIMA

DES ANNÉES-LUMIÈRE D'AVANCE...

ULTRA PERFORMANTE
POLYMERISATION & DIAGNOSTIC

ULTRA POLYVALENTE
OMNIPRATIQUE & ORTHODONTIE

4 MODES PHOTO-POLYMÉRISATION				2 MODES DIAGNOSTIC	
SOFT	STANDARD	BOOST	BOOST MULTICYCLE	DIAGNOSTIC UV	TRANSILLUMINATION
☒ ● ●	☒ ● ●	● ● ●	● ● ●	☒ ● ☒	● ☒ ☒
10s	20s	3s	10x (3s ON + 2s OFF)	120s	120s

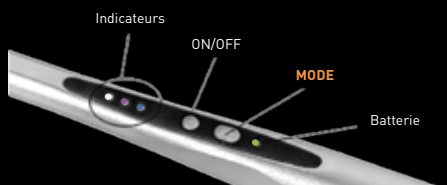


- ☒ OFF
- ON fixe
- ON clignotant
- ▶ Pression sur MODE

La lampe ULTIMA est constituée d'un manche d'une pièce sur lequel est scellé de façon étanche, un panneau de contrôle et une lentille résistante aux rayures.

Après chaque utilisation, essuyez la surface de la lentille avec une lingette ou une compresse imbibée d'un désinfectant anti-microbien. (cf Notice p.8)

Vérifiez régulièrement qu'aucun résidu de résine n'est présent sur la lentille.

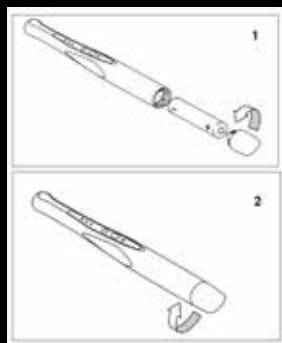

Remplacement batterie [BAT-3.7L]

Les protections intégrales à usage unique empêchent la contamination croisée et évitent l'adhésion de composite ou résine dentaire à la surface de la lentille et du corps de la lampe.



Protection jetable intégrale [ULTI-G500]


ULTIMA

LIGHT-YEARS AHEAD...

MULTI INDICATION
GENERAL PRACTICE & ORTHODONTICS

MULTI MODE
LIGHT-CURING & DIAGNOSIS

4 LIGHT-CURING MODES				2 DIAGNOSIS MODES	
SOFT	STANDARD	BOOST	BOOST MULTICYCLE	UV DIAGNOSIS	TRANSILLUMINATION
⊗ ● ●	⊗ ● ●	● ● ●	● ● ●	⊗ ● ⊗	● ⊗ ⊗
10s	20s	3s	10x (3s ON + 2s OFF)	120s	120s

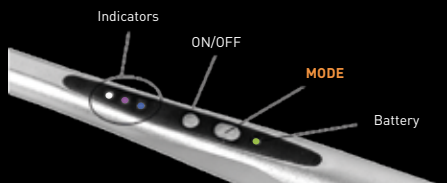


- ⊗ OFF
- ON fix
- ON flashing
- ▶ Press MODE button

ULTIMA curing light is a sealed unit with a sapphire-like hard surface and a scratch resistant glass lens.

After each use, moisten a gauze or soft cloth with an anti-microbial surface disinfectant and wipe the surface and lens. (cf IFU p.19)

Periodically check the lens for cured dental resins.

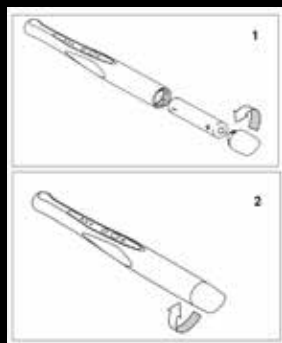

Battery replacement [BAT-3.7L]

Single-use barrier sleeves prevent cross contamination and helps keep dental composite material from adhering to the surface of the lens and body.



Disposable full protection sleeve [ULTI-G500]